


Bionnovation

Regeneração Óssea Guiada em Alvéolo Comprometido

Por José Henrique Villaça

Surgitime. *seal* +

b^onefill
granulado
Porous

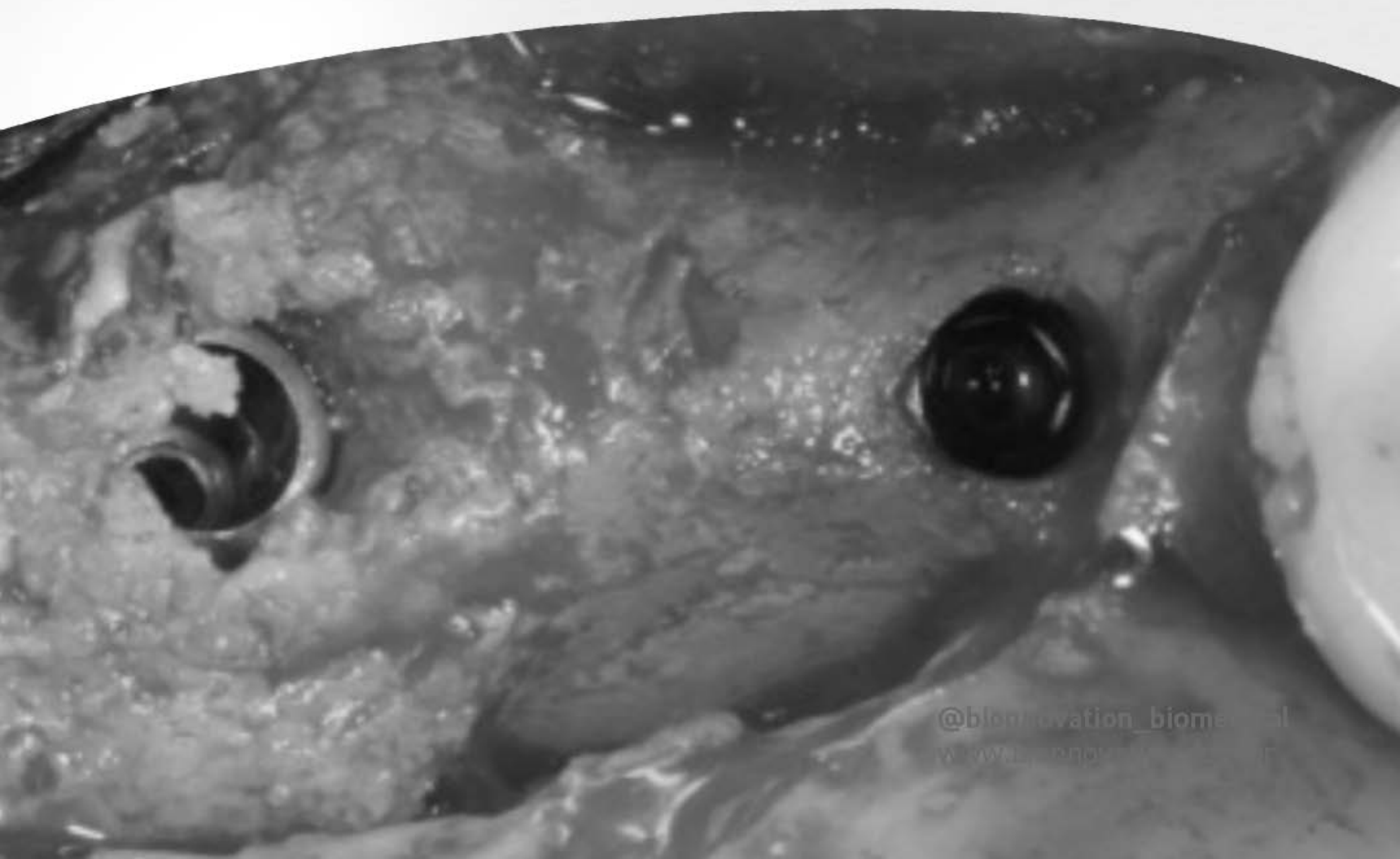


@bionnovation_biomedical
www.bionnovationbiomedical.com

Bionnovation


Visão geral do caso

- Alvéolo totalmente comprometido com perda da tábua óssea vestibular
- Bonefill Porous → preenchimento do defeito
- Surgitime Titânio Seal → selamento alveolar e contenção do enxerto
- Instalação dos implantes após 7 meses

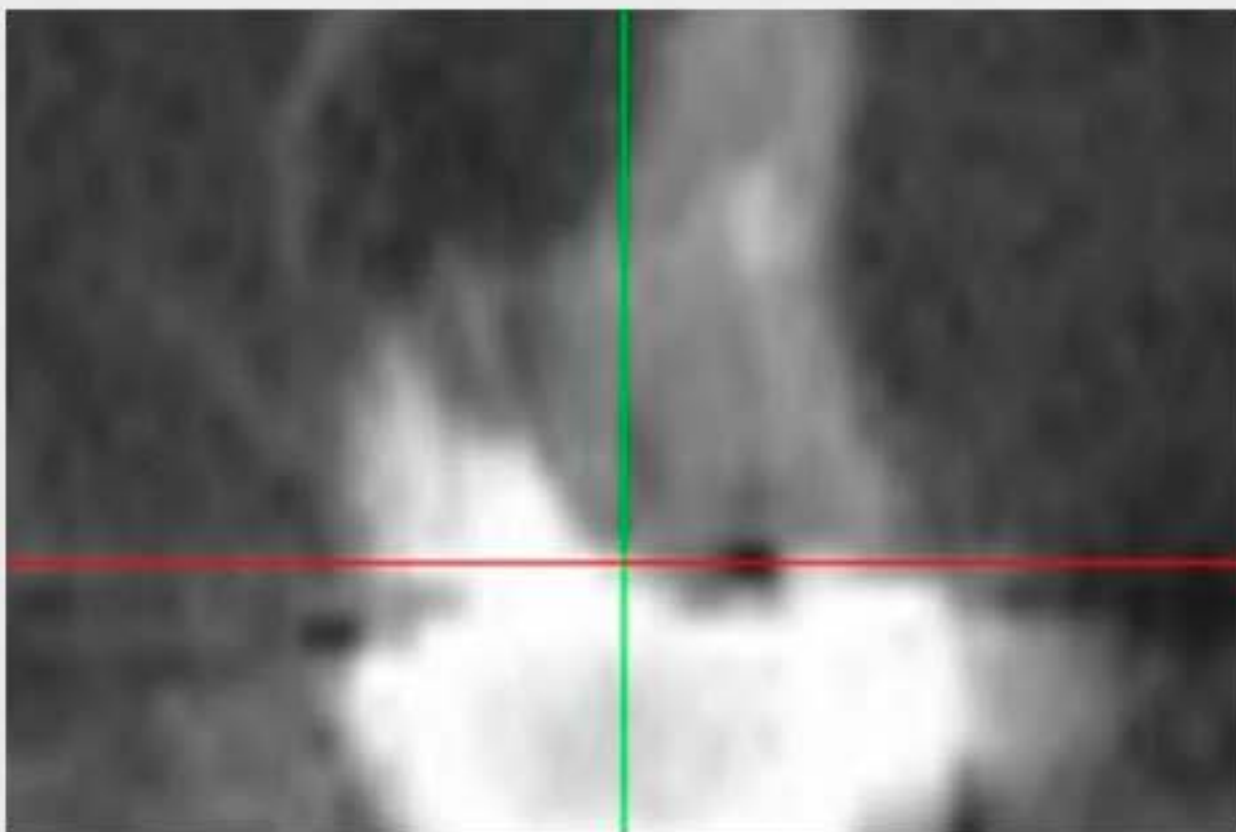

**Tomografia
inicial**

Bionnovation

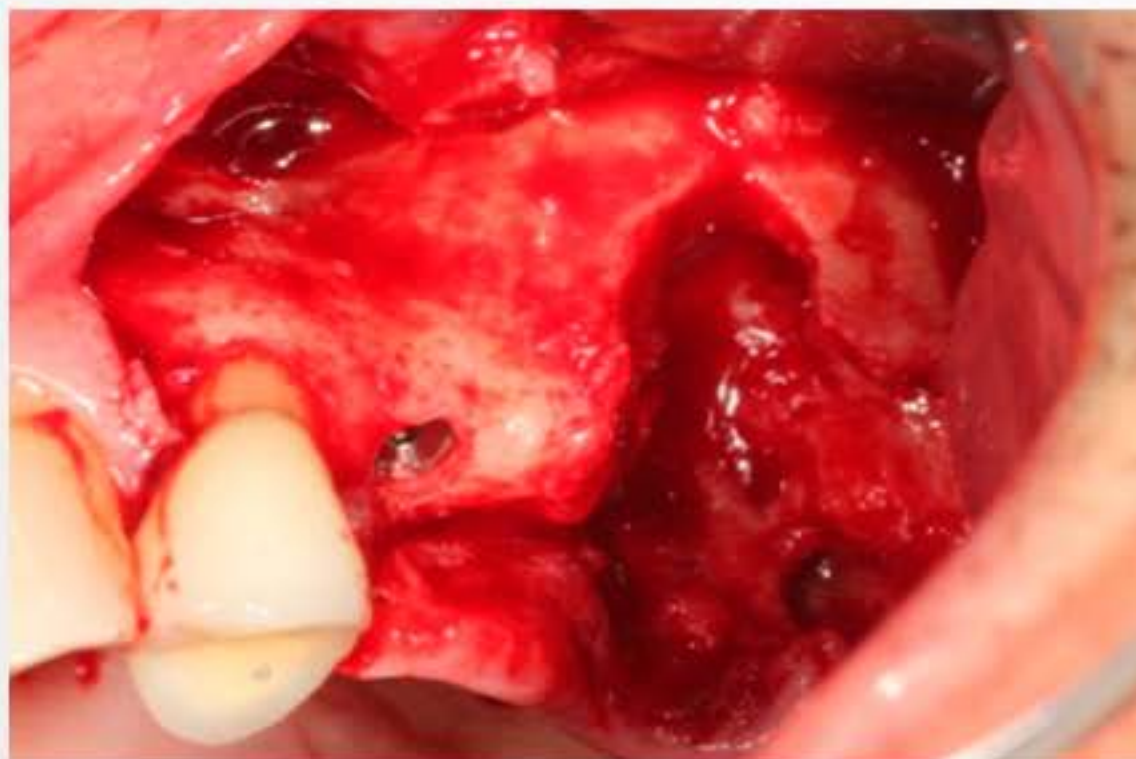


Preparo do leito receptor

Exposição do defeito ósseo com perda da tábua vestibular confirmando a necessidade de reconstrução tridimensional.

Preenchimento com Bonefill Porous

Preenchimento do Alvéolo comprometido com Bonefill Porous médio → **Poros interconectados que favorecem vascularização rápida e formação óssea previsível.**

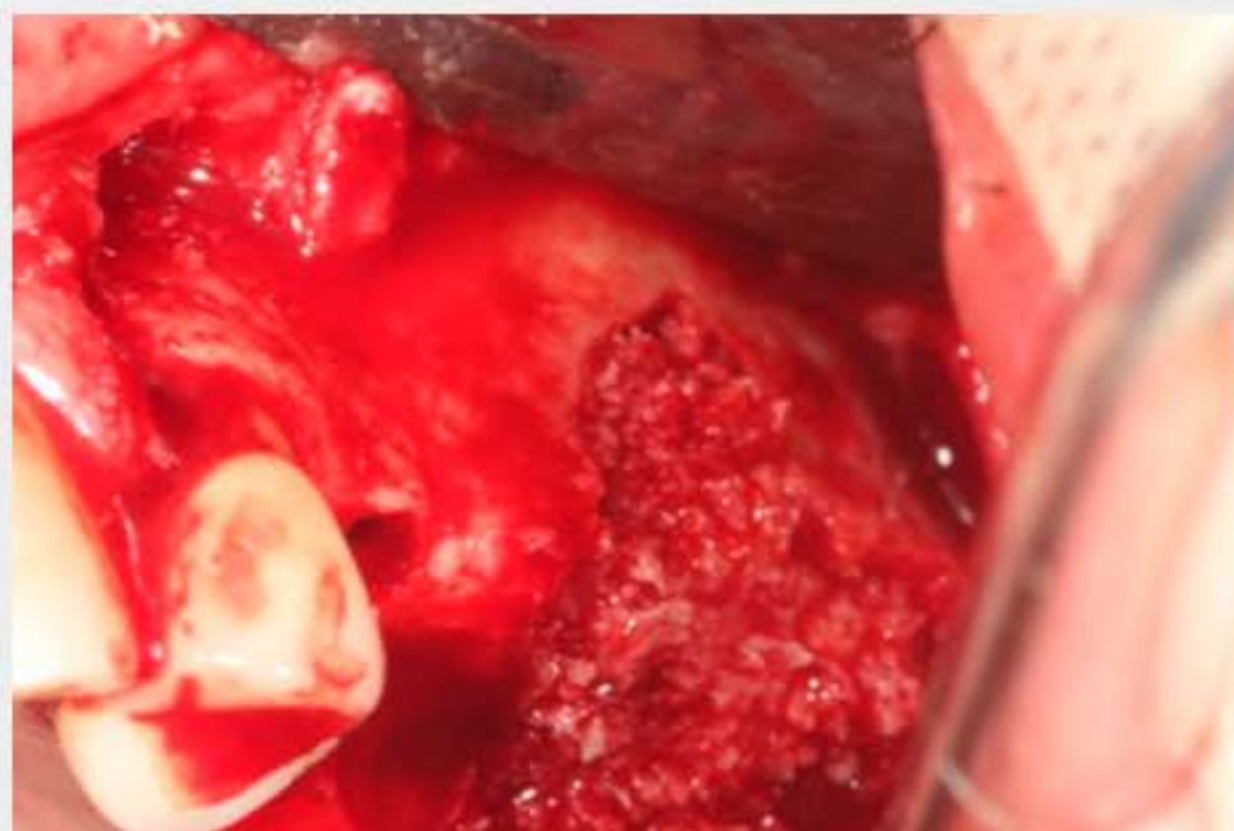

bonefill
granulado
Porous

- 16894 Bonefill Porous Fino 0,5g
- 16891 Bonefill Porous Fino 1,0g
- 16911 Bonefill Porous Médio 0,5g
- 16892 Bonefill Porous Médio 1,0g
- 16928 Bonefill Porous Grosso 0,5g
- 16893 Bonefill Porous Grosso 1,0g

Bionnovation

Surgitime Titânio Seal

Indicada para selamento alveolar, neste caso atuou também como **barreira de contenção e exclusão celular, pela perda da tábua vestibular**. Bioeletricamente neutra, projetada para exposição segura e sem acúmulo de Biofilme.



Surgitime. *seal*

161486 Surgitime Titânio Seal 17x25mm
16890 Surgitime Titânio Seal 34x25mm

Caso e imagens por José Henrique Villaça

@bionnovation_biomedical
www.bionnovation.com.br



Cicatrização favorável dos tecidos moles após remoção da Surgitime Titânio Seal.

Por se tratar de um defeito mais complexo, a Remoção da Surgitime Titânio Seal foi após 7 semanas (período mínimo 14-21 dias)


Bionnovation

Instalação dos implantes 7 meses pós ROG


Volume ósseo reconstruído suficiente para instalação.
Previsibilidade confirmada.



Ganho de volume
ósseo confirmado.
Da perda total à
reconstrução,
com controle clínico.

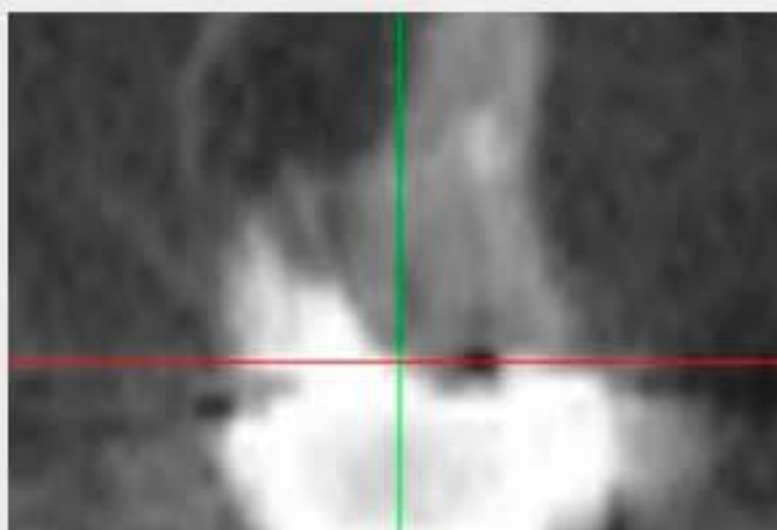

Tomografia inicial

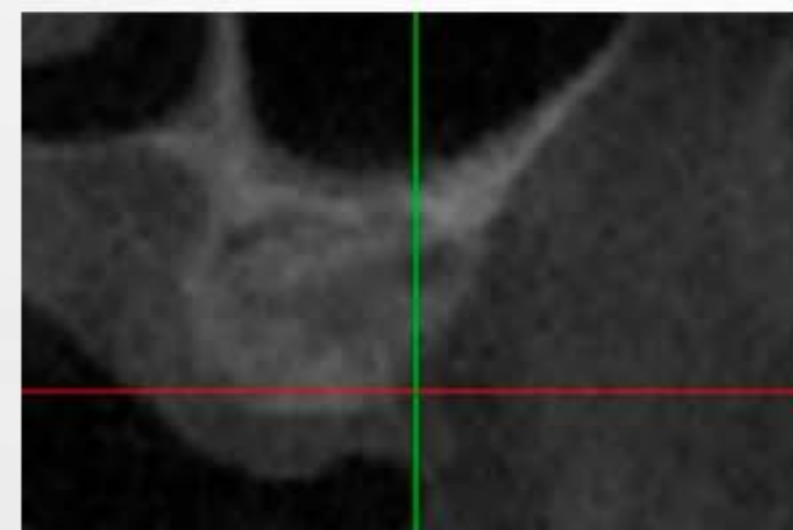

Tomografia após 7 meses

Bionnovation

A previsibilidade começa com
a escolha certa dos materiais.

**Entre em contato com um representante
Bionnovation e conheça nossas soluções**